

NECNO NSW-01



MONITOR DE SATURACIÓN DE
OXÍGENO EN SANGRE



CRONÓMETRO
Y ALARMAS



MONITOR DE CALORÍAS
QUEMADAS



FRECUENCIA
CARDÍACA



IP67

Smartwatch

NECNO
further

Advertencia.

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su nuevo Smartwatch. Guarde este manual con la caja del producto. Leer detenidamente el manual de prevención de riesgos reduce el riesgo de incendio o lesiones.

Para reducir el riesgo de lesiones:

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
No calentar, no abrir, no arrojar la batería al fuego.

Recomendaciones de uso: Ajuste su smartwatch al tamaño adecuado y asegure bien usando el broche. Recuerde que el sensor debe de estar en contacto con su piel para funcionar correctamente.

Especificaciones del producto.

Modelo:	NSW-01
Aplicación:	I-band
Memoria:	32+64MB
BT:	4.0
Pantalla táctil:	LCD, 1.44"pulgadas 128*128 pixeles
Duración de la batería:	Hasta 3 días en uso y hasta 7 días en Standby
Waterproof:	IP67

Descargar aplicación.

Escanee el siguiente código QR, o vaya a la App Store, descargue e instale la App.



I-band

Recibe notificaciones de tus redes sociales.

Requerimientos mínimos de compatibilidad.



Android 5.0+




iOS9.0+

BT

Bluetooth 4.0+

Mapa de producto.

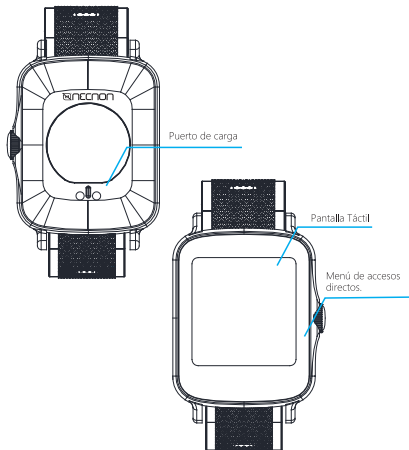

Modo de Carga:

Antes de usar el NSW-01 Smartwatch por primera vez, por favor utilice el cable de carga que incluye (Voltaje de entrada: USB 5.V evite utilizar un cargador con especificaciones distintas a este).

Emparejamiento:

Método 1: Seleccione el dispositivo a vincular.

Abra la aplicación desde su celular, busque la opción enlazar nuevo dispositivo en la interfaz de tu equipo y dé clic en vincular.

Método 2 Escanea el código de enlace:

1. Enlazar desde el Smartwatch: seleccione el menú de acceso directo.
2. Busque la opción de escanear icono QR.
3. Desde el reloj escaneé el QR para enlazarlo a tu dispositivo.

Modo de Uso:

Encendido:

Presione el botón ubicado a un costado de su smartwatch NSM-01 durante 5 segundos.

Apagar dispositivo:

Presione el botón ubicado a un costado de su smartwatch NSM-01 durante 3 segundos.

Instrucciones de Uso:

Deslice hacia abajo para acceder a menú de accesos directos.

Deslice hacia arriba para entrar al menú de Herramientas.

Deslice hacia la derecha o izquierda para acceder al listado de funciones y deportes de la interfaz.

Deslice a la derecha para retroceder de un menú a otro. Utilice este modo de navegación también, para salir de un modo y/o regresar a la función previa.

1.-Interfaz principal herramientas y modo“ MULTI-SPORT”.

Deslice la pantalla a los lados para cambiar rápidamente a la función o la disciplina a monitorear.

2.-Resultados obtenidos.

Antes de apagarse el display de su NSW-01 mostrará el récord obtenido en su actividad al levantar el brazo.

3.- Medición de Frecuencia Cardíaca.

Active este modo, tras transcurrir 2 segundos automáticamente, el NSW-01 iniciará la medición de frecuencia cardiaca. Esta función también puede consultarse directo en tu móvil cuando el smartwatch esté en uso.

4.- Podómetro:

En este menú podrá consultar cada paso recorrido diariamente y los registros de fechas anteriores.

5.- Temperatura:

Active este modo y tras transcurrir 2 segundos automáticamente, el NSM-01 comenzará la medición de la temperatura corporal. Al finalizar la medición deslice hacia la derecha para salir, dé clic para tomar, de nuevo, la temperatura corporal.

6.- Medición de Presión Arterial:

Active este modo, tras transcurrir 2 segundos automáticamente, el NSW-01 empezará la medición de presión arterial. Al finalizar la medición, deslice hacia la derecha para salir. Para tomar nuevamente, ingrese al menú de nuevo.

7.- Medición de oxigenación en Sangre/ Oxímetro:

Active este modo, tras transcurrir 2 segundos automáticamente, el NSW-01 comenzará la medición del nivel de oxígeno en sangre. Esta función también puede consultarse directo en tu móvil cuando el smartwatch esté en utilización.

8.- Medición de la calidad de sueño:

Podrá consultar desde aquí los registros de las horas efectivas de sueño de fechas anteriores.

9.- Información:

En este menú podrá consultar los mensajes no leídos, información sobre nuevas actualizaciones y más. Nota: para visualizar las notificaciones deberán de ser activadas directamente desde la app de su equipo móvil.

10.- Modo Sport

Ingrese aquí y seleccione la disciplina deportiva que desee.

Lista de funciones:

Navegación por la interfaz deslice hacia arriba para regresar al inicio y despliegue el menú. Deslice hacia la izquierda para salir.



Encuentre el dispositivo móvil vinculado.

Cuando ambos dispositivos estén vinculados mediante conexión BT, de clic en este icono seleccionado para activar la función de vibrar y el sonido de su celular, de esta manera encontrará fácilmente el equipo extraviado.

Temporizador

Seleccione el intervalo de tiempo determinado o personalizar el intervalo de tiempo deseado.

Cronómetro.

Inicie, pause, mida los intervalos de tiempo, reinicie y compare los tiempos guardados.

Clima.

Revise el pronóstico del tiempo diariamente. La data se actualizará inmediatamente al conectarse a la aplicación.

Herramientas.

Seleccione este menú para ajustar más funciones del sistema.
Lista de funciones-Herramientas.

Información del producto.

Compruebe la información del dispositivo, firmware, especificaciones de sistema, código QR para vincular el Smartwatch. Tras la vinculación, un texto recordatorio aparecerá en el display de su NSW-01

Llamar.

Seleccione el número deseado para llamar: deslice a la derecha y cambie de un contacto a otro, clic para seleccionar.

Ajuste de brillo.

Deslice hacia abajo o arriba para ajustar el nivel de brillo.

Elegir idioma:

Intercambie el lenguaje predeterminado de tu NSW-01 entre chino e inglés.

Restablecer / (Clear data).

Elimine la información almacenada en tu NSW-01, tras ejecutarlo el dispositivo restablecerá el idioma de configuración original.

Reboot device / Reiniciar.

El dispositivo se reiniciará

Apagado.

Clic en el icono para apagar. También podrá apagarlo dejando presionado el botón lateral de su NSW-01

Acceso directo a menú.

Deslice hacia abajo para abrir el menú, desde aquí encontrará acceso rápido a funciones como BT, nivel de batería, brillo etcétera. Solo dé clic en el icono deseado.



Código QR

Use la aplicación para vincular rápidamente a su smartwatch.

Ajuste de brillo

Deslice hacia abajo para ajustar el brillo de la pantalla.

Music Control

Controle el nivel de volumen, pause, avance o retroceda de una pista cuando su móvil esté conectado al NSW-01

Bloqueo de pantalla

Mantenga presionado el botón lateral de su smartwatch para bloquear.

Obturador remoto

Utilice la app para hacer que su móvil tome fotografías.

Aplicación móvil.

Smart display (Brillo de Pantalla):

Encienda esta función y eleve su brazo, el reloj encenderá el display automáticamente, para ver la hora, sin necesidad de pulsar el botón de desbloqueo.

Modo Anti-Sedentarismo.

Programe recordatorios que le motiven a realizar actividad física, ajustando los intervalos de aviso de acuerdo a su ritmo de vida, así evitará interrupciones en sus actividades cotidianas y se mantendrá motivado.

Encontrar mi NSW-01

Cuando el dispositivo se encuentre extraviado y este esté vinculado vía BT a su Smartwatch, podrá usar esta función para encontrar su NSW-01

Contactos.

Puede seleccionar la imagen para sus contactos desde tu NSW-01 o incluso seleccionar fotografías de su móvil, de igual manera podrá personalizar el fondo de su Smartwatch.

Otras funciones:

Ajusta el formato de fecha y hora, metas de actividad física, rutina de sueño y, exporte toda la información de la información en la App.

Configuración de pantalla:

Personalice el fondo de su NSW-01, seleccione entre alguna de las imágenes preestablecidas desde su aplicación móvil, o bien, cree nuevos fondos de pantalla con imágenes de la galería su teléfono.

Guía rápida de soluciones:

1. Error al emparejar mi equipo móvil al NSW-01 tras el haberse vinculado previamente. El reloj no se puede encontrar, o el código QR no se muestra activo.

1. Vaya al teléfono móvil - Configuración - BT - mi dispositivo - seleccione la pulsera emparejada en la lista de artículos vinculados: ahora dé clic en ignorar este dispositivo.

1.1 por favor asegúrese que la ubicación del dispositivo esté encendida. (Algunos equipos celulares necesitan encender esta función por BT).

2. Desconecte el dispositivo / vincule nuevamente después de reiniciar la función BT.

2. Teléfono / mensajes / notificaciones presentan un funcionamiento deficiente.

1. Para IOS asegúrese que su teléfono móvil, no tenga desactivadas la función, recibir notificaciones, en caso de que este activa, por favor apague y vuelva a encender las mismas una vez, o bien, reinicie el BT de su celular.

2.2 Para Android abra la aplicación/ herramientas / acerca de / ayuda / revise las funciones correspondientes y corrobore están habilitadas.

Nota: Si la aplicación no cuenta con todos los permisos correspondientes activos desde su dispositivo móvil, el NSW-01 no podrá recibir las notificaciones de mensajería, compartir data a su teléfono ni hacer o recibir llamadas.

3. Actualizaciones en APP.

1. Algunas actualizaciones pueden causar problemas al encender su NSW-01, en caso de que este problema se presente, por favor ponga a cargar su smartwatch y enciéndalo mientras esté conectado, acepte la actualización y espera a que se aplique la misma, por favor mantenga la conexión BT entre su equipo móvil y NSW-01 hasta finalizar el proceso.

Precaución:

1.- Al cargar: cuando su equipo presente batería muy baja, por favor cargue su dispositivo, respete el tiempo entre carga y recarga de batería, esto, prolongará la vida de la misma.

2.- Evite cargar su equipo en temperaturas mayores a 50°C, esto impide el sobre calentamiento de su equipo y previene accidentes. Tampoco se sugiere su uso en temperaturas bajo cero.

3.- Este dispositivo incorpora una batería interna, la cual está estrictamente prohibida remover, ya que, quitarla sin conocimientos de ensamblado y reparación, generaría daño irreversible en el dispositivo.

4.- Por favor evite golpear fuertemente su NSW-01, un fuerte impacto podría ocasionar ruptura de batería, en caso de que esta situación ocurra, por favor evite el contacto con piel y ojos, en caso de que esta situación se presente lave inmediatamente la zona afecta y consulte a su médico.

5.- Las mediciones obtenidas con su NSW-01 NO DEBEN ser consideradas como referencia para estudios médicos. No lo emplee como un sustituto de aparatos médicos especializados para monitoreo de presión arterial, ni frecuencia cardiaca, etcétera.

Contenido:

Smartwatch, Extensible, Cable de carga y Manual de usuario.

PÓLIZA DE GARANTÍA

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 12 meses contra cualquier defecto de fábrica y 6 meses para accesorios y consumibles (cargador, batería, display, touch panel, cables) la cual ampara todas las piezas y accesorios del producto, así como también la mano de obra sin ningún cargo para el consumidor.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ticket, factura o nota de venta y la póliza de garantía sellada en el lugar donde la adquirió y/o en nuestro centro de servicio Necnon en donde también usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios de este producto. Es importante que al entregar el producto se redacte en esta póliza el problema del producto enviado a garantía, no se realizará su revisión si no contiene dicho documento y esto demoraría el tiempo de respuesta.

GRUPO NECNON S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o con características similares (en caso de que se haya descontinuado el modelo), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestros centros de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación o cambio no será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros centros de servicio.

Validez e Invalidez de esta garantía:

- El producto es recibido para su revisión y no implica el aceptarlo como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.
- Las garantías serán válidas solo por defecto del fabricante, no por daño físico (productos con circuitos quemados, quebrados, rayados en display, pantallas táctiles quebradas, con piezas sueltas, etc.). Los productos con daño físico, pierden su garantía en forma automática.
- La garantía no procederá en caso de daños causados por la interacción con otros equipos o productos no compatibles, si el producto no ha sido operado conforme a lo señalado por el manual del usuario, así como también si el producto se encuentra quemado por no utilizar una alimentación de corriente adecuada, un cargador idóneo original del producto Necnon o por variaciones de voltaje, finalmente tampoco será cubierta debido al mal uso, abuso, modificación, daño físico, mala configuración en el sistema o intervención en el producto por personal ajeno a Necnon.
- Al proceder la garantía, el remplazo del producto se realizará, no excediendo un plazo de 30 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del modelo o su sustituto.
- En Grupo Necnon verificamos siempre, que sus productos sean entregados físicamente en buen estado. El cliente deberá revisar inmediatamente los productos en cuanto le sean entregados y firmar de conformidad.

Proceso de garantía

Para iniciar el proceso de su garantía favor de ponerse en contacto con nuestro centro de servicio Necnon por el medio que se le facilite.

Información matriz centro de servicio Necnon

DATO	DESCRIPCIÓN
Horario de atención	Lunes a viernes de 10 am a 6 pm horario corrido
Dirección soporte y servicio Necnon	Pedro Ramírez #16 Col. Lomas del Batán CP. 45190 Zapopan, Jalisco.
Teléfono	01(33)36156620
Correo electrónico	servicio@necnontrade.com
WhatsApp	+52 1 33 2557 0937
Formulario web	www.necnontrade.com

NOMBRE DEL USUARIO: _____

TELÉFONO Y CORREO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: _____
